


Atem Feedback

Die Spiegelung der Atmung bewirkt entscheidende Erfolge:

- Intensivere Atmung
- Mehr Sauerstoff im Blut
- Bessere Selbstwahrnehmung
- Verstehen und Steuerung der allgemeinen körperlichen Entspannungsfunktionen

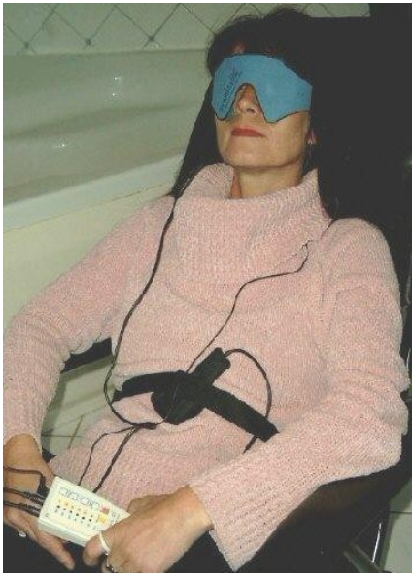

Praxisanwendung

Anwendung und Technik

Die Messung der Atemtätigkeit erfolgt mit Hilfe eines einfachen Sensors, der den Bewegungsdruck misst, welcher durch die Atmung entsteht.

Am Gerät können unterschiedliche Klangmuster eingestellt werden, die je nach Anforderung und Symptom auszuwählen sind.

Mit zunehmender Entspannung sinken die Atemfrequenz und damit der Sauerstoffverbrauch des Organismus, dadurch werden auch andere vegetative Funktionen positiv beeinflusst wie z.B. Blutdruck und der Muskeltonus.

Auf der Anzeige des Gerätes wird der Entspannungsgrad der Person angezeigt.




Einfache Handhabung des Sensors

Anwendungsgebiete

- Depressive Versagenszustände, Angstzuständen, ADS
- Stresssymptome, Anti- Aging
- Funktionelle Störungen von Organismen: Herz und Kreislauf, Atmung, Magen- und Darmtrakt.
- Bluthochdruck, Reizgastritis, chronischen Obstipation,
- Asthma, Spannungskopfschmerzen, Migräne.
- Autoimmunstörungen.
- Schlafstörungen, Burn- Out Syndrom.
- Atemtraining für Stotterer
- Entspannungstraining in der Schwangerschaft und Geburtsvorbereitung

Literatur: Das Respiratorische Feedback nach Leuner; VWB - Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin; 2001

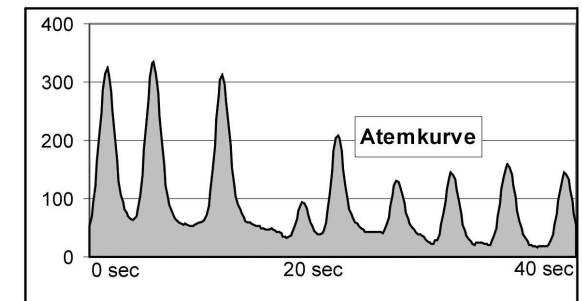

Atemkurve eines Überganges in die Tiefenentspannung

Behandlung

Eine Standard Behandlungseinheit dauert 30 bis 40 Minuten. Bereits nach 2-3 Behandlungen kann eine Symptomreduzierung eintreten.

Abrechnung als Igeleistung gemäß GOÄ Ziffer 846 (170 Punkte 1fach)

RFB.micro ist ein Medizinprodukt nach §§25 und §§26 MPG. Nr. DE/CA76/H00043/01

- Ich bestelle das RFB.micro Biofeedback zum Preis von € 598,00 incl. MwSt.
- Ich möchte das RFB.micro zum Preis von 19,00 € pro Woche mieten. Mindestmietdauer 4 Wochen. Die Leihgebühr wird beim Kauf des Gerätes zu 85% angerechnet. Diese Option ist nur in Deutschland möglich.
- Buchen Sie den Betrag von meinem Konto ab.: Nr.
BLZ.:
Bank :.....
- Lieferung gegen Rechnung (im Ausland nur Vorkasse)

Name

Straße

PLZ/Ort

Tel.:

Datum/Unterschrift.....

Technische Daten:

- RFB Sensor:** Drucksensor
Auflösung 1000 Schritte
- Prozessor:** Digitaler Signalprozessor
- Anzeige:** Entspannungsgrad,
Zeit, Programm
- Batterien:** 2 Mignonzellen
Betriebszeit ca. 20 Std.
Betrieb mit Akkus möglich.

- Lieferumfang:** 1 RFB.micro Atem
Feedback Gerät
1 Atemsensor
1 Feedback Maske
1 Kopfhörer
2 Mignonzellen
1 Bedienungsanleitung

Seit 1999 entwickelt Biomental neue Techniken im Gesundheitsbereich.

Im Vordergrund stehen dabei Produkte, die eine effektive Therapie ohne Nebenwirkungen ermöglichen und unkompliziert im Praxis-Klinik- und Privatbereich eingesetzt werden können.



Am Weiher 1
15306 Vierlinden
Tel.:033477 4560 Fax:033477 4562

Internet: www.BioMental.de
eMail: info@BioMental.d

Neu: Respiratorisches Feedback Gerät RFB.micro nach Prof. Leuner

Gegen Stress, Schmerz und Angst
und den daraus folgenden Störungen



Der Atem und die Wahrnehmung des Atems sind die zentralen Zugänge zur Entspannung.

Über die Wirksamkeit des Atemfeedback Verfahrens existieren kontrollierte Studien.

Information für Fachkreise